



ORINAL MASCULINO Y CUÑA

Para la recogida de fluidos biológicos humanos (heces y orina). Limpiar y desinfectar antes de su uso. Sin esterilizar.
El producto no está fabricado con látex de goma natural o goma natural seca.
Producto sanitario.

Finalidad prevista:

Tanto la cuña como el orinal masculino tienen como finalidad la recogida de orina y/o heces en pacientes encamados o con movilidad reducida.

Destinados al uso hospitalario y/o domiciliario.

Estos productos no son aptos para cualquier otra aplicación que no sea la definida anteriormente.

Composición:

La cuña sanitaria está fabricada en polipropileno y colorante blanco.

El orinal masculino está fabricado en polietileno de alta densidad.

Limpieza y desinfección:

Limpiar con detergente y desinfectar con lejía u otros desinfectantes, antes de cada uso. Tanto la cuña como el orinal son aptos para su uso en lavadoras desinfectadoras.

Vida útil:

La vida útil del orinal y de la cuña viene determinada por el desgaste y deterioro debidos al uso. Desechar cuando se detecten cambios de color, asperezas, deformaciones, etc.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz del sol.

Glosario de símbolos:

REF	Número de catálogo	LOT	Número de lote		Fecha de caducidad
MD	Producto Sanitario	QTY	Cantidad		Marcado CE
	Manténgase fuera de la luz del sol	i	Consulte las instrucciones de uso en www.enfa.es/eifus		Fabricante
UDI	Identificador único de dispositivo				

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a ENVASES FARMACÉUTICAS, S. A. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.



FECHA REVISIÓN: 2023/06



ENVASES FARMACÉUTICAS, S.A.

C/ Paralela, 15.

28860 Paracuellos de Jarama, Madrid. España/Spain.

info@enfa.es - www.enfa.es

TEC176/0